



EDUKAČNÍ MATERIÁL

KONTROLNÍ SEZNAM PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE Předepisování EpiPenu®/EpiPenu® Jr.

Příjmení/Jméno

Datum narození

Datum

1

Bylo u Vašeho pacienta diagnostikováno riziko
nebo dřívější výskyt anafylaktické reakce?

ANO

2

Je pacient seznámen s tím, kdy si musí adrenalin podat?

ANO, a už EpiPen®/
EpiPen® Jr. používá

▶ Pokračujte 3. KROKEM

ANO, ale EpiPen®/
EpiPen® Jr. zatím nepoužívá

▶ Pokračujte 2. KROKEM

NE

▶ Pokračujte 1. KROKEM

1. KROK: Už jste vysvětlil(a) pacientovi, jak se chovat v případě kontaktu s alergenem a kdy si musí adrenalin podat?

ANO

▶ Pokračujte 2. KROKEM

2. KROK: Už jste pacientovi představil(a) EpiPen®/EpiPen® Jr. a ukázal(a) přesné kroky, jak jej používat s využitím zkušební pomůcky a promítnutím videa „Jak používat EpiPen®/EpiPen® Jr.“ (Více informací najdete na zadní straně)

ANO

▶ Pokračujte 3. KROKEM

3. KROK: Už jste požádal(a) pacienta, aby Vám předvedl manipulaci se zkušební pomůckou EpiPen®/EpiPen® Jr.?

ANO

3

Už jste pacientovi doporučil(a) pravidelný
návlek aplikace a zaškolení všech blízkých?

ANO

4

Pacient si je vědom potřeby mít u sebe po celou dobu
jedno nebo dvě adrenalinová pera EpiPen/ EpiPen Jr.
dle doporučení lékaře.

ANO

5

Už jste poradil(a) pacientovi, aby si nastavil připomínku
týkající se data expirace autoinjektoru EpiPen®/EpiPen®
Jr. tak, aby si jej včas vyměnil?

ANO

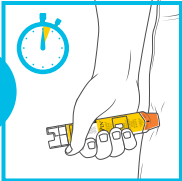


Jak POUŽÍVAT EpiPen®/EpiPen® Jr.?

Vyndejte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** z přenosného pouzdra. Lehněte si s nohama ve zvýšené poloze, abyste usnadnili průtok Vaší krve nebo se posadíte, pokud se Vám těžko dýchá.

- 

1. Uchopte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** do dominantní ruky (pravák do pravé, levák do levé), palec položte co nejbližší k modré ochranné čepičce sevřete pevně ruku kolem pera **EpiPen®/EpiPen® Jr.** a vytáhněte tuto modrou bezpečnostní čepičku. Pamatujte si: „Modré do nebe, oranžové do stehna.“
- 

2. Podržte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** ve vzdálenosti asi 10 cm od vnější strany stehna. Oranžový hrot musí mířit na vnější stranu stehna.
- 

3. Pevně a ve správném úhlu (90 stupňů vzhledem k vnější straně stehna) zabodněte pero **EpiPen®/EpiPen® Jr.** do vnější části stehna. Po dobu 3 sekund držte pero pevně na stehně.
- 

4. **EpiPen®/EpiPen® Jr.** odstraňte a bezpečně zlikvidujte. Po použití se oranžový kryt jehly automaticky vysune tak, že zakryje jehlu.
- 

5. Po dobu 10 sekund oblast vpichu masírujte. Zavolejte rychlou záchrannou službu na lince 155 nebo tísňovou linku 112, požádejte o lékařskou pomoc a informujte personál, že se jedná o anafylaktický šok.

Pacient si je vědom potřeby mít u sebe po celou dobu jedno nebo dvě adrenalinová pera EpiPen®/EpiPen® Jr. dle doporučení lékaře.

Jak UCHOVÁVAT EpiPen®/EpiPen® Jr.

- **EpiPen®/EpiPen® Jr.** uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.
- Uchovávejte pouzdro v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Při vystavení vzduchu nebo světlu se adrenalin rychle znehodnocuje a mění barvu na růžovou nebo hnědou.
- Nezapomeňte občas zkontrolovat, zda je obsah skleněného zásobníku pera **EpiPen®/EpiPen® Jr.** autoinjektor stále čirý a bezbarvý.
- Vyměňte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** autoinjektor před uplynutím doby použitelnosti nebo dříve, pokud roztok změní barvu nebo obsahuje sraženinu.

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Aktuálně platný SmPC lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v sekci Databáze léků na adrese <http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php>.